



WipeClean Ethanol Disinfection 80%

Desinfektionsklud



Engangsklud til nem og hurtig desinfektion af overflader, der tåler alkohol.

Anvendelsesområde

Beregnet til overfladedesinfektion af rene, mindre overflader, der tåler alkohol. Ikke velegnet til brug på træ, stof, naturgummi, malede overflader, papiroverflader samt visse plastmaterialer. Tjek producentens vejledning for desinfektion af udstyret før brug.

Udviklet til brug i sundhedssektoren men kan anvendes i forskellige brancher. Velegnet til brug på på hospitaler, plejecentre, hjemmeplejen, klinikker, tandlæger, dyrlæger, restauranter, køkkener, kontormiljøer samt i biler og andre transportmidler.

TIL PROFESSIONEL BRUG

Produktegenskaber

Engangsklud til nem og hurtig overfladedesinfektion. Kludene indeholder den rette mængde desinfektionsvæske og er klar til brug lige fra pakken. Indeholder 80% denatureret ethanol (denatureret med IPA). Uparfumeret.

PT2 og PT4 biocidprodukt til professionel brug.
Godkendt til brug i fødevarerirksomheder uden efterskyl med vand.

De bløde og behagelige klude er fremstillet af polyester, og er designet til at efterlade væsken på overfladen. Herved opnås den størst mulige desinfektionseffekt.

Kludene er pakket i lufttætte forpackninger med nem lukning som sikrer, at de ikke tørrer ud. Kludene er foldet så de nemt kan tages ud af pakken enkeltvis, klar til brug.

WipeClean Ethanol Disinfection 80% findes i følgende størrelser:

5252 Mini: 20 x 20 cm. rækker til 0,5 m²

5211 Small: 20 x 30 cm. der rækker til 1 m²

5212 Large: 30 x 40 cm. der rækker til 2,5 m²

Opfylder kravene i EN14885 og har dokumenteret baktericidal, mykobactericidal, fungicidal og virucidal effekt. Produktet er derfor bl.a. virksomt mod Coronavirus, M. norovirus og Adenovirus.

Vurderet af CEI til Intermediate level desinfektion.
Godkendt af Fødevarestyrelsen (J.nr: 2015-29-7105-00105).

pH: 5,5 - 6,5.

Brugsanvisning

Kludene er klar til brug og skal anvendes på rengjorte og tørre overflader. Benyt personlige værnemidler i henhold til lokale arbejdsinstruktioner. Brug en klud til at desinficere, hold kluden fladt og tør overfladen af i S-form, så hele overfladen er våd. Brug en ny klud hvis kluden bliver snavset eller tør. Ved synligt snavsede overflader rengøres overfladen inden desinfektion. Må ikke anvendes på overflader, der er følsomme overfor alkohol. Lad overfladen tørre naturligt i overensstemmelse med den angivne kontakttid. Kræver hverken efterbehandling eller efterskyl med vand. Genbrug ikke en klud. Luk altid emballagen efter brug.

Ikke beregnet til håndhygiejne.

| Test standard | Claim | Test organism | Contact time |
|---------------|--|---|--------------|
| EN16615 | Bactericidal Effect | P. aeruginosa S. aureus E. hirae | 1 min |
| EN13727 | Bactericidal Effect | P. aeruginosa S. aureus E. hirae | 1 min |
| EN13697 | Bactericidal Effect | P. aeruginosa S. aureus E. coli E. hirae | 1 min |
| EN13697 | Fungicidal Effect | A. brasiliensis C. albicans | 2 min |
| EN13624 | Fungicidal Effect | A. brasiliensis C. albicans | 2 min |
| EN13624 | Yeasticidal Effect | C. albicans | 1 min |
| EN16615 | Yeasticidal Effect | C. albicans | 1 min |
| EN14348 | Tuberculocidal/Mycobactericidal Effect | M. terrae M. avium | 1 min |
| EN14476 | Virucidal Effect | Adenovirus M. norovirus | 1 min |

Indhold

| Ingrediens | Effekt |
|---------------------|-----------------|
| Denatureret ethanol | 80% Aktivt stof |

Opbevaring

Opbevares tørt, frostfrit og ikke i direkte sollys.
Holdbarhed: 24 måneder fra produktionsdato, 30 dage fra åbning.

Udseende og duft

Uden farve og parfume.

Produktionsland

STORBRITANNIEN

Anvendelses- og miljø sikkerhed

Biocider skal anvendes på forsvarlig vis. Læs altid mærkningen og produktoplysningerne før anvendelse. Sikkerhedsdatablad findes på www.kiilto.dk.

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler.

Emballagematerialer

Emballagen på vores produkter er fremstillet af plast og karton, som er genanvendelige materialer. Vi ønsker, at emballage fra vores produkter genanvendes, når det er muligt.

På www.kiilto.dk kan du læse mere om vores emballage, samt hvordan det kan genanvendes.

| Forpakningsstørrelse / Varenummer | Salgsenhed | Varenummer | GTIN | GTIN (salgsenhed) | Forpakning |
|-----------------------------------|------------|------------|------|-------------------|------------|
|-----------------------------------|------------|------------|------|-------------------|------------|

| | | | | | |
|-------------|--|------|---------------|---------------|-------|
| 12 x 20 stk | | 5212 | 5701684521229 | 5701684521212 | Wipes |
|-------------|--|------|---------------|---------------|-------|

| | | | | | |
|-------------|--|------|---------------|---------------|-------|
| 20 x 25 stk | | 5211 | 5701684521120 | 5701684521113 | Wipes |
|-------------|--|------|---------------|---------------|-------|

| | | | | | |
|--------------|--|------|---------------|---------------|-------|
| 12 x 100 stk | | 5252 | 5701684525227 | 5701684525210 | Wipes |
|--------------|--|------|---------------|---------------|-------|

**Standard tilbehør**

| | |
|---|------------------------------------|
| WipeClean Ethanol Disinfection 80% Mini | 4114 Væggholder til WipeClean Mini |
|---|------------------------------------|

| | |
|--|-------------------------------------|
| WipeClean Ethanol Disinfection 80% Small | 4112 Væggholder til WipeClean Small |
|--|-------------------------------------|

| | |
|--|-------------------------------------|
| WipeClean Ethanol Disinfection 80% Large | 4113 Væggholder til WipeClean Large |
|--|-------------------------------------|

Øvrig information

Tjek den senest opdaterede version af brochuren på vores hjemmeside www.kiilto.dk eller send en mail til kundeservice på info.dk@kiilto.com.